

Emmi - steri 15 - HORKOVZDUŠNÝ STERILIZÁTOR



- jednoduché ovládání otočným spínačem
- nastavitelný ohřev až do +200 °C
- nastavitelná doba čištění 1 - 120 minut nebo nepřetržitý provoz
- vynikající účinek
- vysoká účinnost
- včetně hliníkové vložky-kazety
- sterilizátory EMAG jsou bezúdržbové

Společnost EMAG AG disponuje certifikátem

DIN EN ISO 9001:2000

Popis výrobku

Horkovzdušný sterilizátor Emmi-steri 15 je vyroben z nerezové oceli a je odolný proti vysokým teplotám a korozi. Toto zařízení je kompletně izolováno skelnými vlákny, aby bylo zabráněno přehřívání vnějších povrchů.

Sterilizační komora je hermeticky utěsněna krytem opatřeným tepelně odolným silikonovým těsněním. Sterilizátor Emmi-steri 15 je vybaven vložkou a vkládacím košem vyrobenými z hliníku. Obě vložky jsou opatřeny systémem otvorů, aby byla zajištěna kvalitní a dostatečná cirkulace vzduchu. Zařízení je vybaveno ohříváčem z nerezové oceli, který má vysoký faktor účinnosti a nízkou netečnost.



1. Regulátor teploty

2. Časový spínač

Technické údaje

Parametry	Hodnoty
Výška	210 mm
Hloubka	220 mm
Šířka	320 mm
Hmotnost	4,3 kg
Napájecí napětí	230 V/střídavé/50 Hz/1 A
Třída ochrany	IP 32
Výkon	asi 250 W
Rozsah provozní teploty	+10 až +30 °C

Právo na změny technických údajů vyhrazeno

Dodávané příslušenství

- napájecí kabel
- vyjímatelná hliníková vložka
- vyjímatelný hliníkový koš
- dva držáky pro vyjímání hliníkové vložky

Popis funkce

Provoz tohoto zařízení může být nastaven na určitou dobu - maximálně dvě hodiny - nebo může být nepřetržitý. Spouštěcí spínač je červený a během provozu zařízení svítí. Navíc je toto zařízení vybaveno zelenou kontrolkou, která svítí při normálním provozu, oranžovou kontrolkou, která svítí, je-li zapnutý ohřev a červenou kontrolkou, která se rozsvítí v případě, kdy teplota překročí maximální povolenou hodnotu a kontrolu nad teplotou přebírá bezpečnostní obvod.

Požadovaná teplota je nastavována regulátorem teploty. Toto zařízení je vybaveno automatickou regulací teploty, která disponuje kapilárním termostatem s automatickým nastavením v rozsahu až do +200 °C. Avšak v případě, kdy přesto dojde k překročení teploty, bude aktivováno druhé bezpečnostní řízení, což je bimetalový spínač, který pak převezme regulaci teploty.

Je-li aktivován bimetalový spínač, rozsvítí se červená výstražná kontrolka na přední části zařízení. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis.

Určené použití

Toto zařízení může být použito pouze pro účely, které jsou uvedeny v katalogu a v technických popisech, což znamená pro sterilizaci nástrojů a náradí, a to pouze společně s externími zařízeními a komponenty, které jsou doporučeny nebo schváleny společností EMAG AG. Jakékoli jiné použití tohoto zařízení je považováno za nesprávné použití. Toto zařízení může být obsluhováno pouze osobami, které jsou řádně seznámeny s jeho použitím. Při provozu tohoto zařízení musí být věnována pozornost osobám, které se nachází v jeho blízkosti.

V případě nesprávného použití nebude společnost EMAG AG odpovídat za možné poškození a nebude zaručovat správnou funkci komponentů.

Součástí správného použití je také dodržování všech informací uvedených v návodu k použití.

Na to upozorňuje symbol  na typovém štítku.

Správný a bezpečný provoz tohoto zařízení zahrnuje správnou přepravu, skladování, instalaci a montáž, stejně jako opatrné zacházení a údržbu. Podle nařízení BGV A3 musí být prováděny opakované kontroly. Toto zařízení musí být instalováno tak, aby byla stále přístupná zástrčka napájecího kabelu.

Nesprávné použití

V případě nesprávného použití tohoto zařízení může existovat riziko ohrožení života a způsobení zranění a také riziko způsobení škod. Proto je nesprávné použití zakázáno. V případě nesprávného použití nebude společnost EMAG AG odpovídat za možné poškození a nebude zaručovat správnou funkci komponentů. Abyste zabránili nesprávnému použití tohoto ultrazvukového čistícího zařízení, musíte dodržovat následující pokyny:



- Toto zařízení může být napájeno pouze napětím, jaké je vytištěno na typovém štítku na zadní části krytu (zásuvky).
- Toto zařízení nesmí být používáno pro čištění kontaktních čoček.
- Před každou manipulací s tímto zařízením (například přeprava, přemístění atd.) musí být zajištěno odpojení jeho napájecího kabelu a komora zařízení musí mít pokojovou teplotu.
- Pro čištění nesmí být použity žádné hořlavé nebo agresivní chemikálie (například kyseliny atd.).
- Toto zařízení může být používáno pouze v prostředích, kde se nevyskytují žádné výbušné plyny.
- Toto zařízení musí být používáno pouze uvnitř budov a v suchém prostředí.
- Dojde-li během přepravy k poškození tohoto zařízení, nepřipojujte jej k elektrické síti.
- Toto zařízení musí být chráněno před vlhkostí a mokrem - vnitřní část zařízení nesmí být naplněna vodou a do zařízení nesmí vniknout voda.

Použití

Je-li zařízení - po vybalení - přepravováno, musí být zajištěno tak, aby bylo přenášeno ve vodorovné poloze a aby bylo drženo za spodní část. Před připojením tohoto zařízení k elektrické síti musí být zkontrolováno, zda napětí v této síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku tohoto zařízení (230 V, střídavé, 50 Hz). Zařízení musí být postaveno pouze na rovném povrchu, aby bylo umožněno

proudění vzduchu pod tímto zařízením. Pozornost musí být věnována také tomu, aby byla zadní část tohoto zařízení vzdálena od stěny nebo jiné překážky minimálně 10 cm, aby byla umožněna dostatečná cirkulace vzduchu. Napájecí kabel musí být připojen k tomuto zařízení a potom k příslušnému napájecímu zdroji. Nastavte spouštěcí spínač do polohy I (ON - zapnuto) a zkontrolujte, zda svítí zelená kontrolka.

 **Poznámka:** Je-li toto zařízení zapnuto poprvé, krátkodobě může být cítit mírný pach vypalovaného keramického vlákna. To je normální! Otočte časový spínač ve směru pohybu hodinových ručiček a nastavte jej na požadovanou dobu, maximálně 120 minut. Nastavte regulátor teploty na požadovanou teplotu a zkontrolujte, zda svítí oranžová kontrolka.

 **Poznámka:** Oranžová kontrolka může lehce problikávat, dokud nebude dosaženo požadované nastavené teploty.

Je-li zařízení zapnuto při pokojové teplotě, dosažení požadované teploty bude trvat asi 30 minut. Doporučená provozní teplota je +150 °C až +180 °C.

Bude-li zařízení pracovat déle než 120 minut, časový spínač musí být nastaven proti směru pohybu hodinových ručiček do polohy označené symbolem „∞“.

Vložka nesmí být přetížena, aby bylo dosaženo správné sterilizace. Vložený materiál musí umožnit správnou cirkulaci vzduchu. Jakmile bude dosaženo nastavené teploty, doba sterilizace bude trvat od 30 do 120 minut, v závislosti na právních požadavcích a/nebo na specifikaci výrobců položek, které budou sterilizovány. Maximální možná teplota nesmí být udržována příliš dlouho, aby bylo zabráněno poškození sterilizovaných předmětů. **Poznámka:** Rozsvícení červené kontrolky (výstraha) znamená, že teplota překročila +220 °C a že došlo k aktivaci bezpečnostního termostatu.

V takovém případě bude toto zařízení vypnuto a musí být informován autorizovaný servis.


Po uplynutí nastavené doby sterilizace bude zařízení automaticky zastaveno.

Vložení/vyjmutí vložek:



Vložka musí být umístěna otvorem dolů

Vkládací koš musí být umístěn nahoře s otvorem nahoře.

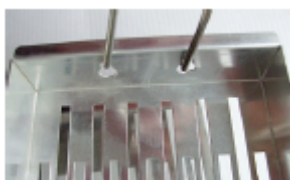

Vložka může být snadno vyjmuta pomocí dvou držáků

Čištění

Doporučujeme vám čistit toto zařízení pouze pomocí měkkého hadříku a čisté vody.

Nikdy nepoužívejte kyseliny nebo rozpouštědla! Před čištěním je velmi důležité, aby bylo odpojeno napájení tohoto zařízení.

Záruka

Záruční doba tohoto zařízení je 12 měsíců - od data zakoupení.

Závady vyskytující se v průběhu záruční doby, které vzniknou v důsledku vady materiálu nebo výrobní vady, budou opraveny zdarma, a to buď formou opravy nebo výměny. V souladu s platnými právními předpisy jsou vyloučeny další kompenzační nároky.

Záruka ztrácí platnost v případě demontáže výrobku, fyzického poškození, nesprávného použití, úpravy, opravy neoprávněnou osobou, neopatrnosti a používání výrobku k jinému než k určenému účelu.

Žádný případ záruční opravy nebo výměny nepovede k prodloužení stanovené záruční doby.

V případě neoprávněné reklamace, to znamená závady v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného použití, si vyhrazujeme právo účtovat náklady, které nám vzniknou.

Pro nárokování záruční opravy je nezbytné, aby byl předložen doklad o zakoupení s uvedeným datem nákupu.

Aby bylo umožněno rychlé vyřízení záruční opravy, musíte vadný výrobek zaslat přímo na níže uvedenou adresu se zaplaceným poštovním. Z logistických důvodů nemůžeme akceptovat žádnou zásilku s nezaplaceným poštovním.

Děkujeme vám za vaši spolupráci.

EMAG AG

Gerauer Str. 34, D-64546 Moerfelden-Walldorf

Tel.: +49 (0) 6105 - 40 67 00

www.emag-germany.de

datum zakoupení

razítko prodejce

právo na provádění změn vyhrazeno

Autorská práva © EMAG AG. Všechna práva vyhrazena. Vyrobeno v EU. Obsah tohoto návodu k obsluze je chráněn autorskými právy a nesmí být kopírován částečně, ani celkově. Jakékoli změny, vyjímání, vkládání a změny této publikace nebo jejího překladu vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti EMAG AG.

Společnost EMAG AG disponuje certifikátem

DIN EN ISO 9001:2000

