

GLOBACID®ID

Koncentrovaný prostředek na bázi aminů a KAS,
určený na dekontaminaci, čištění a dezinfekci
lékařského instrumentária, přístrojů a
endoskopů.



- široké spektrum účinnosti
- vhodné pro použití v ultrazvukových lázních i myčkách endoskopů
- pracovní roztok připravený k použití lze uchovávat v uzavřené nádobě po dobu 4 týdnů

SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní a sporicidní (*Clostridium difficile*).

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti

OBLAST A NÁVOD NA POUŽITÍ:

Připravte pracovní roztok **GLOBACID®ID** vhodné koncentrace podle požadované doby expozice. Použijte studenou vodu nebo vodu pokojové teploty. Dbejte na úplné ponoření nástrojů v dezinfekčním roztoku. Po uplynutí expoziční doby nástroje podle potřeby opláchněte pod tekoucí vodou nebo sterilní vodou. Nedoporučuje se vystavovat nástroje/přístroje působení roztoku déle, než je doba expozice.

SLOŽENÍ:

100g přípravku obsahuje účinné látky:
didecyldimethylamonium chlorid 9g, N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin 14g, pH~10-11

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Určeno pro profesionální použití. Nedoporučuje se míchat s jinými přípravky či detergenty. Není kompatibilní s přípravky na bázi aldehydů. Nepoužívejte na latex, polykarbonát, měkčené PVC a přírodní i syntetické gumy.

OBJEDNÁVKOVÉ INFORMACE:

Název produktu

GLOBACID ID 1 I

GLOBACID ID 5 I

Balení

12/karton

1/kanistr

Číslo výrobku

1-242-701910

1-242-701930

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Společnost své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

DOBA EXPIRACE:

36 měsíců

Výrobek je označen značkou CE podle směrnice pro zdravotnické prostředky 93/42/EE

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek tř. IIb



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

