

## PEDICE Parafínová vana – Luxury Wax

Model: FHC-4000D

### Specifikace produktu

- Název produktu: Digitální ohřivač parafínového vosku
- Řízení teploty: NTC senzor
- Teplotní rozsah: 30–70 °C (86–158 °F)
- Příkon: 200 W
- Objem: 4500 ml
- Rozměry: 408 × 254 × 170 mm
- Napětí:
  - USA: AC 110–120 V
  - EU: AC 220–240 V
- Certifikace: CE (EMC, LVD), FCC
- Třída ochrany: I
- Materiál těla: ABS
- Materiál víka: PS



### Návod k použití

#### Zapnutí a příprava

1. Zapojte napájecí kabel a stiskněte tlačítko napájení.
2. Sejměte víko, vložte vosk do nádoby a víko opět nasadte. Použijte minimálně 2,5 kg parafínu.
3. Zvolte požadovaný režim ohřevu.

#### Režimy ohřevu

##### 1) Manuální režim

- Nastavte teplotu pomocí tlačítek + a –.
- Ohřivač začne hřát na nastavenou teplotu.
- Displej zobrazuje aktuální teplotu.
- Po rozpuštění vosku lze teplotu upravit.
- Po dosažení nastavené teploty ji přístroj udržuje až do vypnutí.

##### 2) Inteligentní (Smart) režim

- Krátce stiskněte tlačítko Smart.
- Na displeji se na 3 sekundy zobrazí „HEAT“, poté aktuální teplota.
- Přístroj automaticky zvolí optimální způsob ohřevu.
- Když 3× pípne a zobrazí se 53 °C (127 °F), vosk je připraven k použití.
- Teplota se automaticky udržuje do vypnutí.

##### 3) Režim časovaného ohřevu (rezervace)

- Stiskněte tlačítko časovače (červená kontrolka).
- Nastavte dobu odkladu – každé stisknutí = 1 hodina.

- Rozsah: 2–99 hodin.
- Spustí se odpočítávání.
- Poslední 2 hodiny před koncem začne přístroj ohřívát.
- Po skončení odpočtu se vosk automaticky nastaví na 53 °C (127 °F).
- Teplota se udržuje až do vypnutí.

#### Postup aplikace parafínu

1. Roztáhněte prsty a pomalu ponořte ruku nebo nohu, abyste otestovali teplotu. Ponořte na 3 sekundy.
2. Vymějte končetinu a počkejte 3 sekundy.
3. Zakryjte ruku nebo nohu plastovou fólií a vložte do termo rukavice/botičky asi na 15 minut.
4. Po 15 minutách odstraňte rukavici i fólii a sloupněte ztuhlý vosk. Použitý vosk i fólii vyhoďte.
5. Vypněte a odpojte přístroj. Zbýlý vosk lze použít příště, pokud byly dodrženy hygienické normy.

#### Bezpečnostní pokyny a upozornění

1. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou osobou.
2. Produkt nelikvidujte s běžným odpadem. Recyklujte jej ekologicky.
3. Děti od 8 let a osoby se sníženými schopnostmi mohou přístroj používat pouze pod dohledem.
4. Děti si se zařízením nesmí hrát.
5. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
6. Přístroj je určen pouze k ohřevu parafínového vosku.
7. Nepoužívejte přístroj, pokud:
  - je poškozen kabel nebo zástrčka
  - je zařízení poškozené,
  - nefunguje správně.
8. Držte kabel mimo horké povrchy.
9. Používejte pouze na rovném povrchu.
10. Neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
11. Neumisťujte tam, kde může spadnout do vany nebo umyvadla.
12. Pokud spadne do vody, ihned jej odpojte ze zásuvky.
13. Během provozu neomotávejte kabel kolem přístroje.
14. Po použití odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout.
15. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj zůstává dlouho horký.

#### Upozornění

Při popálení nebo během aktivního ohřevu nikdy nevkládejte ruce ani nohy do přístroje.

**Dovozce pro ČR:** ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-pedikura.cz

## PEDICE Parafínová vaňa – Luxury Wax

Model: FHC-4000D

### Špecifikácie produktu

- Názov produktu: Digitálny ohrievač parafínového vosku
- Regulácia teploty: Senzor NTC
- Teplotný rozsah: 30–70 °C (86–158 °F)
- Spotreba energie: 200 W
- Objem: 4500 ml
- Rozmery: 408 × 254 × 170 mm
- Napätie:
  - USA: AC 110–120 V
  - EÚ: AC 220–240 V
- Certifikácia: CE (EMC, LVD), FCC
- Trieda ochrany: I
- Materiál tela: ABS
- Materiál veka: PS



### Návod na použitie

#### Zapnutie a príprava

1. Zapojte napájací kábel a stlačte tlačidlo napájania.
2. Odstráňte veko, vložte vosk do nádoby a nasadte veko späť. Použite najmenej 2,5 kg parafínového vosku.
3. Vyberte požadovaný režim ohrevu.

#### Režimy ohrevu

##### 1) Manuálny režim

- Nastavte teplotu pomocou tlačidiel + a –.
- Ohrievač začne ohrievať na nastavenú teplotu.
- Na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota.
- Po roztavení vosku je možné teplotu nastaviť.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty ju zariadenie udrží, kým sa nevypne.

##### 2) Inteligentný režim

- Stlačte krátko tlačidlo Smart.
- Na displeji sa na 3 sekundy zobrazí „HEAT“ a potom aktuálna teplota.
- Zariadenie automaticky vyberie optimálny spôsob ohrevu.
- Keď zariadenie trikrát zapípa a na displeji sa zobrazí 53 °C (127 °F), vosk je pripravený na použitie.
- Teplota sa automaticky udržiava, kým sa zariadenie nevypne.

##### 3) Režim časovaného ohrevu (rezervácia)

- Stlačte tlačidlo časovača (červená kontrolka).
- Nastavte čas oneskorenia – každé stlačenie = 1 hodina.
- Rozsah: 2–99 hodín.
- Spustí sa odpočítavanie.

- Zariadenie začne ohrievať 2 hodiny pred koncom odpočítavania.
- Po skončení odpočítavania sa vosk automaticky nastaví na 53 °C (127 °F).
- Teplota sa udržiava až do vypnutia.

#### Postup aplikácie parafínu

1. Rozprestrite prsty a pomaly ponorte ruku alebo nohu, aby ste otestovali teplotu. Ponorte na 3 sekundy.
2. Vyberte končatinu a počkajte 3 sekundy.
3. Zakryte ruku alebo nohu plastovou fóliou a vložte ju do teplej rukavice/topánky na približne 15 minút.
4. Po 15 minútach vyberte rukavicu a fóliu a odstráňte stvrdnutý vosk. Použitý vosk a fóliu zlikvidujte.
5. Vypnite a odpojte zariadenie. Zvyšný vosk môžete použiť nabudúce, ak boli dodržané hygienické normy.

#### Bezpečnostné pokyny a varovania

1. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba.
2. Produkt nevyhadzujte spolu s bežným odpadom. Recyklujte ho spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
3. Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženou schopnosťou môžu zariadenie používať iba pod dohľadom.
4. Deti sa nesmú hrať so zariadením.
5. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
6. Zariadenie je určené iba na ohrev parafínového vosku.
7. Zariadenie nepoužívajte, ak:
  - je poškodený kábel alebo zástrčka,
  - je poškodené zariadenie,
  - nefunguje správne.
8. Kábel držte ďalej od horúcich povrchov.
9. Používajte iba na rovnej ploche.
10. Neponárajte do vody ani iných tekutín.
11. Neumiestňujte na miesto, kde by mohlo spadnúť do vane alebo umývadla.
12. Ak spadne do vody, ihneď ho odpojte.
13. Počas prevádzky neomotávajte kábel okolo zariadenia.
14. Po použití ho odpojte a nechajte vychladnúť.
15. Udržujte mimo dosahu detí. Zariadenie zostáva dlho horúce.

#### Upozornenie

Nikdy nekladajte ruky ani nohy do zariadenia, ak ste sa popálili alebo ak sa zariadenie aktívne zahrieva.

**Dovozca pre Slovenskú republiku:** ODEL LABORATORIES, s.r.o./PROFI-pedikura.cz